

おくすりの名前

吸入回数

(手技確認における8つのポイント※)

※(一社)吸入療法アカデミー方式

- ①デバイス保持(垂直) ②カウンター指差し確認 ③通気口の位置確認 ④ボタン・レバー・カバー操作は最後までしっかり行き指を離す ⑤口角を閉じる ⑥吸い方(強く深く:掃除機のように) ⑦息止め(指折り5つ) ⑧うがいは必ず行う(ガラガラ、ブクブク各3回)



カウンスターが0になった後の吸入が終了した後は、次回からは新しい吸入器を使用して下さい

- ・カウンスターが0になるとロックがかかりキャップが外れなくなり使用できなくなります
- ・吸入器を振ると「カサカサ」音がするのは乾燥材の音です

《吸入映像》※1

(毎日の操作)

(注意点)



(約1分10秒)

(約1分10秒)

*あなたのウイークポイントにチェック☑していただきますので参考にしてください。

セット後は、吸入器を傾けると薬剤がこぼれることがあるので振ったり、逆さにしない

ポイント

① 薬剤の準備	<input type="checkbox"/> 薬剤セット時の操作は吸入器を垂直に持ち行つ <input type="checkbox"/> カウンターで残量確認する <input type="checkbox"/> キャップを小さく左にカチッと音がするまで回し、上に引っ張るようにしてキャップを外す		<ul style="list-style-type: none"> ・垂直に持ち、しっかり操作しないと正確な1回分量がセットされない
② 息吐き	<input type="checkbox"/> 無理のない程度に息を吐き一旦止める (吸入口には息を吹きかけない)		<ul style="list-style-type: none"> ・息吐きをしないとしっかり吸えない
③ 吸入	<input type="checkbox"/> 吸入口をくわえ、口角を閉じ、強く深く、息を最後まで吸い込む (通気口をふさがない)		<ul style="list-style-type: none"> ・息がもれないように口角を閉じる ・イメージで吸う
④ 息止め	<input type="checkbox"/> 吸入器から口を離し、口を閉じ、指折り5つ息を止める (無理のない程度で良い)		<ul style="list-style-type: none"> ・肺により多くの薬を定着させるため
⑤ 息吐き	<input type="checkbox"/> 鼻からゆっくりと息を吐く		<ul style="list-style-type: none"> ・口から吐くと速くなることもある
繰返し	*吸入器内の薬を完全に吸いきる場合は②~⑤を繰り返す *複数回吸入する場合は①~⑤を繰り返す		
⑥ 後片付け	<input type="checkbox"/> キャップポインターと矢印を重ねるようにキャップをはめ、カチッと音がするまで右に回してしっかり閉じる <input type="checkbox"/> キャップポインターと残量計(カウンター)の位置が合っていることを確認する		<ul style="list-style-type: none"> ・キャップを閉じる前に吸入口を拭く ・カチッと音がするまでキャップを閉めない、次の吸入準備ができない
⑦ うがい	<input type="checkbox"/> 吸入後はガラガラうがい、ブクブクうがいを各3回ずつ行う		<ul style="list-style-type: none"> ・口腔内及び咽頭についた薬を洗い流す

吸入ステロイドは口腔内カンジダや嘔声などの副作用を防止するため、吸入後すぐにうがいをする
 それ以外の吸入薬も統一化を図るため、うがいを行うようにする

※画より著者の許可を得て使用

保険調剤薬局名(薬剤師名) : _____ 年 月 日